

Burnaid[®]

BURNAID PRODUKTER

Vad gör Burnaid

- Lindrar smärta.
- Kyler genom att dra värmen ur brännskadan.
- Steril barriär mot kontamination.
- Icke häftande.
- Bakteriedödande – hjälper mot infektion.
- Kylande lindring upp till 2 timmar.
- Idealisk för transport eller där större brännskador kan inträffa.
- Kompresser för att täcka alla kroppsdelar – brännsår, händer, lemmar, bål, ansikte.
- **OBS!** Brännskador som är större än en femkrona eller djupa ska alltid uppvisa för läkare.

Burnaid - Gel

Första hjälpen vid brännskada, solsveda, skällning, insektsbett och småsår.

På alla platser där en mindre brännskada kan uppstå.

- **Burnaid spray 50ml**
- Spraya rikligt över skadan.
- Skall ej gnidas in!
- Låt gelen ligga på i 30 – 50 minuter.
- **Burnaid gel 3,5g**
- Riv av och kläm ur gelen på brännskadan.
- Skall ej gnidas in!
- Låt gelen ligga på i 30 – 50 minuter.
- Vid skada på fingertoppar, stoppa in fingret i påsen med gel.



Kompresser storlekar:

10x10, 20x20, 30x40 (face mask), 55x40, 120x200 (body) cm

Burnaid – Kompresser

Första hjälpen vid brännskada och skällning

På alla platser där större brännskada kan uppstå.

- **Burnaid kompresser**
- Riv av och ta ur kompressen och placera på brännskadan.
- Lägg den tomma påsen över kompressen och linda försiktigt ett bandage över för att hålla kompressen på plats.
- Låt gelen ligga på i upp till 2 timmar.